

4点支持杖(スポンジグリップ) 取扱説明書

この度は、当杖をお買い求め下さいまして誠にありがとうございます。

下記の取扱説明をお読みくださいまして、正しく御愛用くださいますようお願い申し上げます。

この取扱説明書は大切に保存してください。

【特徴】

握りはスポンジ製で手に優しくしっかり握れます。

【寸法調整の方法】

プッシュボタン(高さ調整ボタン)式による高さ調整が可能です。

1. セーフティーナットを緩めます。
2. 支柱側面の高さ調整ボタンを指で強く押し込みながら伸展棒を抜き差しして高さ調整をします。
3. 希望の高さに調整したら、高さ調整ボタンが支柱側面からきちんと突出したことを確認します。
4. 調整後は、セーフティーナットをしっかり締めます。(ネジ山が潰れる事がありますので締め過ぎないようにする事)
(裏面図 B 参照)

【正しい寸法の決め方】

- ◆ 杖内側中央を 握り手と同じ側の足先前方外約 20cm に置き、肘が 30~40 度屈曲した状態が適当な長さの目安です。
- ◆ 正しい寸法については医師や、各種療法士等の専門アドバイザーの方にご指導を仰いでください。(図 A 参照)

【製品の規格】

※全長は裏面寸法表示を参照してください。

【使用上の注意】 ⚠

- ◆ 当杖は、『つえ』なしで自立歩行できる人が、より安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。次の①②に該当する場合の使用には適しません。(体重をかけすぎたりすると、かえって肩や手を痛めることもあるからです) 又、購入後、次のような状態になった場合は使用を停止すべきです。
① 杖なしでは歩行できない方(手すりに伝わらなければ歩行できない方、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない方が含まれます。)
② リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない方。ただし、医師などの指導の下での使用は含みません。
- ◆ 上記【正しい寸法の決め方】を参考に身体に合った寸法で御使用ください。不適當な寸法の杖を使用すると、正しく歩行できないばかりか、体に不都合が生じる場合が有りますので、歩行並びに取扱いには医師及び専門のアドバイザーの指導に従ってください。
- ◆ 握りに破れや割れが出た場合や、掌を傷つけるような傷が付いた場合は使用を中止してください。
- ◆ 使用前・使用中も高さ調整ボタンが支柱側面からきちんと突出していることを確認して歩行してください。
- ◆ セーフティーナットがしっかりと絞まっている事を確認して歩行してください。但し、セーフティーナットは支柱の遊び=ブレを抑制し、雑音を抑えるものです。パイプ同士の遊びを完全に止めることは出来ません。セーフティーナットは高さ調整ボタンが突出していない状態で支柱を固定支持することは出来ません。危険です。高さ調整ボタンが突出した状態でご使用ください。セーフティーナットを必要以上に締め付けるとネジ山が潰れる事がありますのでご注意ください。
- ◆ 支柱の真上に荷重が掛かるように握って使用してください。(裏面図 C 参照)
- ◆ 完全平面環境以外では支持が不安定となり、ガタつきます。非平面で長期間使用したり、強い荷重を欠けた場合、脚部分の水平性が損なわれることがありますのでご注意ください。
- ◆ 濡れたり凍結した床一面・路面等滑りやすい場所での使用は、十分注意してください。
- ◆ 杖先が嵌まり込むような溝や窪みがある路面での使用は、杖の破損や、使用者の転倒につながりますので十分注意してください。
- ◆ 先ゴムは消耗品です。先ゴムの耐久度は、利用者、歩行条件、床面・路面等により変化します。磨耗して底面の溝が浅くなったり、割れ・欠けが発生している場合は、正しいサイズの新しい先ゴムと交換してください。先ゴムの交換は4個同時に交換してください。(先ゴムはきちんと底まで差し込んで装着してください。4個同時に交換しないとガタつきの原因となります。)
- ◆ 握りは発泡ゴム製スポンジです。硬いものに当たると傷が付いたりしますので注意してください。又、60℃以上の温度で荷重が掛かると変形することがありますので夏場の自動車内に置いて直ぐの使用等にはご注意ください。又、ストーブ等の暖房器具のそばに置かないようにしてください。
- ◆ その他、異常音や不都合が生じた場合は使用を直ちに中止して専門家に点検してもらってください。
- ◆ 用途以外(登山・護身用等)に使用しないでください。
- ◆ 1人専用が望ましい使用方法ですが、貸与等される場合は使用者自身の始業点検と、貸与業者の定期点検を怠らないように使用してください。
- ◆ 使用後の手入れは、乾燥させてきれいに清掃してしまってください。清掃の際、シンナー等の溶剤や研磨剤入りの洗剤、ナイロンタワシや金タワシを使用しないでください。
但し、長時間使用しない場合は、高温直射日光を避けて保管してください。


シルバー大：ベース：30.5×20cm	全長：75～98cm	約 2.5cm 間隔	重量：約 950g
茶 大：ベース：30.5×19cm	全長：75～98cm	約 2.5cm 間隔	重量：約 1000g
シルバー小：ベース：21.5×14.5cm	全長：74.5～97.5cm	約 2.5cm 間隔	重量：約 825g
茶 小：ベース：21.5×14.5cm	全長：74.5～97.5cm	約 2.5cm 間隔	重量：約 770g

材 質 握り：発泡ゴム 支柱：アルミ軽合金 脚部：鉄(シルバー:クロムメッキ 茶:粉体塗装)

原産国：台湾 寸法規格の数値はロットにより多少前後します。

交換用先ゴムの内径 大：15 mm φ (要座金) 小：12 mm φ (要座金)

利用者の体重の上限 約 100Kg 標準の耐用年数 4年

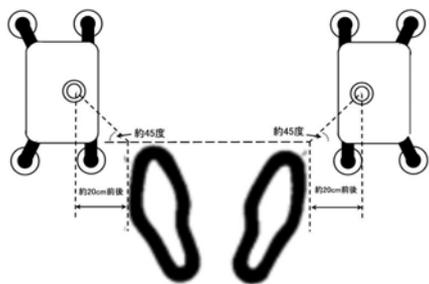

支柱の真上に荷重が掛かるように握って使用してください。

図 C



セーフティーナットを緩め、高さ調整ボタンを押し込みながら握りを回転させて左右を入れ替えます。

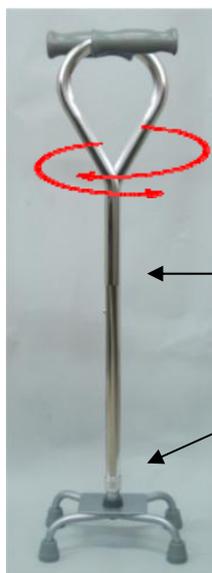


図 B

高さ調整ボタン

セーフティーナット



杖を突く場合、杖を斜めに角度をつけて接地させると脚部の水平性が損なわれる場合がありますので、床面や地面に脚部を水平に接地させるように使用してください。



株式会社 赤 井
〒558-0011 大阪市住吉区菟田8丁目11番19号
お問い合わせ、御相談はお客様相談室 06-6608-0562

保 証 書

本書は、下記の保証規定の内容で、本製品の無料修理を行うことをお客様にお約束するものです。保証期間中に故障した場合には、原則としてお買い上げの販売店にご連絡下さいますようお願い申し上げます。弊社へ直接の修理ご依頼の場合は、送料はお客様のご負担となります。ただし、当社からの返送料は弊社負担とします。

保 証 規 定

本製品は、厳密な検査に合格したものです。お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合は、本保証規定に従い故障箇所の無償修理をさせていただきますので、お買い上げの販売店に本書を添えてご依頼ください。修理は、部品の交換もしくは補修により行いますが、修理困難等の場合、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換することに対応させていただきます場合があります。ただし、本製品の故障により生じるお客様の損害に対し当社は修理以外の責任を負いません。

尚、保証期間内においても次の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示がない場合。
2. 本書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合。
3. ご使用上の誤りや不適切な取り扱い、不当な修理や改造による故障の場合。
4. お客様による運送または移動に際し、落下、衝撃等に起因する故障、損傷の場合。
5. 火災・地震・水害等の天災地災による故障損傷の場合。
6. 消耗部材を取り替える場合。(先ゴム・セーフティーナット及び内部部品・高さ調整用部品、握りパッド)
7. 本保証は日本国内のみで有効です。(This warranty is valid only in Japan)

販売店様へお願い：ご販売時に保証書の販売店名、販売日付をご記入の上、保証書をお客様にお渡しください。記入なき場合には本保証書は無効となります。

お買い上げ日	年 月 日	販 売 店
保証期間	お買い上げの日より 1年間	
お客さま	お名前 住所	