

Day's ロフトランドクラッチ 取扱説明書

この度は、当杖をお買い求め下さいまして誠にありがとうございます。

下記の取扱説明をお読みくださいまして、正しく御愛用くださいますようお願い申し上げます。

★この取扱説明書は大切に保存してください。★

【寸法調整の方法】

高さ調整用プッシュボタンによる高さ調整が可能です。握り高さと、肘受け高さを調整できます。

1. 支柱両側面の高さ調整用ボタンを同時に指先で強く押し込みながら、伸展パイプを抜き差しして握りの高さ調整をし、高さ調整ボタンを支柱側面から突出させて固定します。同様に肘受けパイプの両側面の高さ調整用ボタンを同時に指先で強く押し込みながら肘受け高さを上下して調整し、高さ調整用ボタンを支柱側面から突出させ固定します。
2. 希望の高さに調整したら、高さ調整用ボタンの頭が支柱両側面からきちんと突出したことを確認します。

【正しい寸法の決め方】

- ◆ 杖の先端が握り手と同じ側の足先 外前方約 20cm に置き、肘が 30～40 度屈曲した状態が適当な長さの目安です。
- ◆ 肘受けの長さは、肘関節の運動の邪魔にならない範囲で出来るだけ伸ばして使用してください。
- ◆ 正しい寸法については医師や、各種療法士等の専門アドバイザーの方にご指導を仰いでください。（図 A 参照）
- ◆ 肘受けが狭い場合、肘受けを軸と共に杖本体から抜き取り、約 80℃の熱湯に暫く浸け、肘受け樹脂を柔らかくして適当な大きさに広げ、広げた状態で冷水に浸ける等冷却し肘受けの形を固定させます。この作業をするときは、熱湯や熱くなった肘受けで火傷をしないように十分注意して作業してください。

【歩行方法】

正しい歩行方法については医師や、各種療法士等の専門アドバイザーの方にご指導を仰いでください。

基本的には2本1組で使用することが望ましいです。

【製品の規格】

※寸法規格は最下段寸法表示を参照してください。

【使用上の注意】⚠

- ◆ 当杖の使用が適当であるかを医師等の専門家により判断された方のみが使用できます。 身体機能に適合しない無理な使用は転倒や身体故障の原因になりますので、必ず専門家の判断により使用を決定してください。
- ◆ 上記【正しい寸法の決め方】を参考に身体に合った寸法で御使用ください。
- ◆ 不適当な寸法の杖を使用すると、正しく歩行できないばかりか、体に不都合が生じる場合が有りますので、歩行並びに取扱いには医師及び専門のアドバイザーの指導に従ってください。
- ◆ 握り部分にガタつきが有る場合は使用を中止してください。
- ◆ 使用前・使用中も高さ調整用差込ピンの頭が支柱側面からきちんと突出していることを確認して歩行してください。
- ◆ その他、異常音や不都合が生じた場合は使用を直ちに中止して専門家に点検してもらってください。
- ◆ 先ゴムが破れたり摩耗したりしている場合は、サイズの合った新しい先ゴムと早めに交換してください。又、先ゴムはきちんと底まで差し込んで装着してください。
- ◆ 濡れたり凍結した床面・路面等滑りやすい場所での使用は、十分注意してください。
- ◆ 握りや肘受けは 60℃以上の温度で荷重が掛かると変形することがありますので夏場の自動車内に置いて直ぐの使用等にはご注意ください。又、暖房器具のそばに置かないこと。
- ◆ 用途以外（登山・護身用等）に使用しないでください。
- ◆ 長時間使用しない場合は、高温直射日光を避けて保管してください。


株式会社 赤 井

〒558-0011 大阪市住吉区菟田8丁目11番19号

お問い合わせ、御相談はお客様相談室 06-6608-0562

握り高さ：65.5～93.5cm 約 2.5cm 間隔
肘受高さ：20～27.5cm
重量：約 560g
寸法規格の数値はロットにより多少前後します。
材質 握り：ナイロン 支柱：アルミ軽合金
肘受け：塩化ビニール
交換用先ゴムの内径：22mm φ（要座金）

図 A

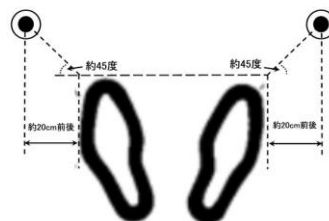

販売店様へ：裏面保証書にご記入の上、お客様にお渡しください。

保 証 書

本書は、下記の保証規定の内容で、本製品の無料修理を行うことをお客様にお約束するものです。
保証期間中に故障した場合には、原則としてお買い上げの販売店にご連絡下さいますようお願い申し上げます。
弊社へ直接の修理ご依頼の場合は、送料はお客様のご負担となります。ただし、当社からの返送料は弊社負担とします。

保 証 規 定

本製品は、厳密な検査に合格したものです。 お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合は、本保証規定に従い故障箇所の無償修理をさせていただきますので、お買い上げの販売店に本書を添えてご依頼ください。 修理は、部品の交換もしくは補修により行いますが、修理困難等の場合、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換することで対応させていただく場合があります。ただし、本製品の故障により生じるお客様の損害に対し当社は修理以外の責任を負いません。

尚、保証期間内においても次の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示がない場合。
2. 本書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合。
3. ご使用上の誤りや不適切な取り扱い、不当な修理や改造による故障の場合。
4. お客様による運送または移動に際し、落下、衝撃等に起因する故障、損傷の場合。
5. 火災・地震・水害等の天災地災による故障損傷の場合。
6. 消耗部材を取り替える場合。（先ゴム・パイププレ止め部品・高さ調整用部品、握り・肘受け）
7. 本保証は日本国内のみで有効です。（This warranty is valid only in Japan）

販売店様へのお願：ご販売時に保証書の販売店名、販売日付を記入の上、保証書をお客様にお渡しください。記入なき場合には本保証書は無効になります。

お買い上げ日	年 月 日	販 売 店
保証期間	お買い上げの日より 1 年間	
お客さま	お名前 住所	