

トランスファーベンチ HZ-N 取扱説明書

この度は、トランスファーベンチ HZ-N をお買い求め下さいまして誠にありがとうございます。
下記の取扱説明をお読み下さいまして、正しく御愛用下さいますようお願い申し上げます。

*******必ずお読み下さい*******

★この取扱説明書は大切に保存してください。★

【特徴】

- ◆ アルミ軽合金製のフレームでお手入れがし易く、衛生的です。
- ◆ クッション性に優れたクッションをビニール膜で覆ったお尻にやさしい座面です。

【寸法調整の方法】

- ◆ 各脚の高さ調整用ボタンを指先で押し込んで伸展パイプを抜き差しして高さを決めてください。
- ◆ 座面が出来るだけ水平になるように高さ調整してください。
- ◆ 手摺の左右を入れ替える場合、背もたれベースパイプを本体から取り外し、背もたれの向きを入れ替えて取り付けてください。

【製品の規格】

座面高さ：50～60cm 必要床面：74cm×54cm 重量：約5.2Kg




【使用上の注意】


- 座面が出来る限り水平になるように高さ調整して御使用下さい。
- 座面はビニール被膜ですのでタバコの火など高温の物を近づけないようにしてください。温度で融けて穴が開きます。又、鋭い尖った物にもご注意ください。穴が開いてクッションが水を含んでしまいます。ビニールパッドに穴が開いた場合は、浴室用シリコン系コーキング剤でシールすることが出来ます。
- 耐水構造ですが、座面をお湯の中に浸けて使用しないで下さい。
- 手摺は、体のバランスを取る程度のご利用ください。体重を支える目的で使用しないで下さい。転倒する危険性があります。
- 体に水分や石鹸が付いた状態で座る場合、滑り落ちないように気をつけてください。
- 入浴後は、出来るだけ風通しのよい所に置き、乾燥させてください。
- お手入れには、中性の洗剤をご使用ください。フレームのアルコール消毒はかまいませんが、ビニールパッドのアルコール消毒は表面が白化したり硬くなったりしますのでご遠慮ください。又、金属タワシ等でのお手入れはしないで下さい。
- 高さ調整用ボタンを取り付けるバネは、鉄製です。時々点検して、ボタンが落下していないか確認してください。ボタンが落下して状態で座ると体重を支えることが出来ず、転倒する場合があります。危険です。交換部品をお求め下さるか、修理に出してください。
- 先ゴムは、磨耗することはありませんが経年劣化します。滑り止めの機能がなくなっているようでしたら、4個一度に交換してください。先ゴムの先端は水が溜まらないように水抜き穴があるものをご使用ください。
- フレームは、ボルトナットで組み立て固定してあります。時々点検して、緩み、ガタつきがないか確認してください。緩みが有る場合は、締め直しをしてください。緩んだまま使用を続けると、ボルトが外れたりフレームに傷が付き、使用できなくなったり、座った時転倒する危険性があります。
- その他、不都合と思われたり、危険と思われる兆候が有る場合は、よく点検し、安全性を御確認の上ご使用下さいませようお願い申し上げます。

トランスファーベンチ HZ-N 組み立て方

1. 本体を裏返し、背もたれ用ベースパイプ 2 本を取り付ける。
2. ベースパイプは固定用ボタンを押しこみながら取り付け穴に根元まで差し込み。固定用ボタンが取り付け部分から突出するまで差し込む。

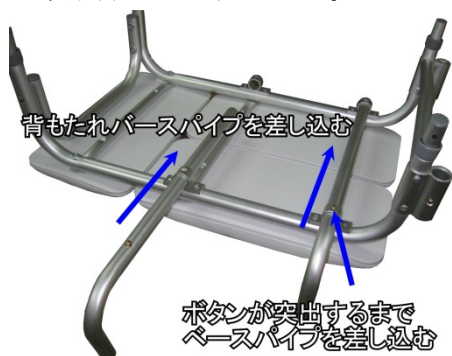

3. 伸縮脚を本体脚に被せる様に差し込み取り付ける。脚固定用穴の位置を確認しながら差し込むこと。
4. 脚固定用ピンを差し込み、本体脚と伸縮脚を固定する。 4 脚同様に固定する。

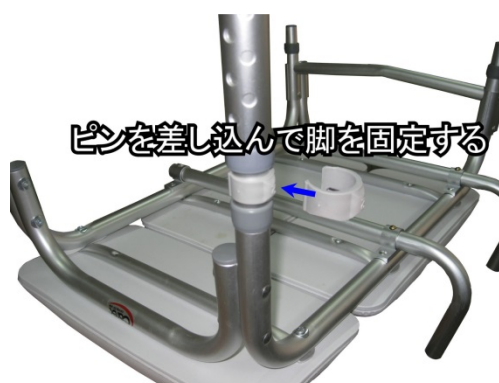

5. 本体を表返し、背もたれを固定用ボタンを押しこみながらベースパイプに差し込む。
6. 固定用ボタンがベースパイプの固定用穴から突出するまで差し込む。



7. 手すりを手すり固定用パイプに差し込む。 固定用ボタンを押しこみながら差し込む。
8. 手すり固定用ボタンが固定用パイプから突出するまで差し込む。

