

## トランスファーベンチ HZN 組み立て方

1. 本体を裏返し、伸縮脚を本体脚に被せる様に差し込み取り付ける。脚固定用穴の位置を確認しながら差し込むこと。
2. 脚固定用ピンを差し込み、本体脚と伸縮脚を固定する。 4脚同様に固定する。



3. 背もたれ用ベースパイプ 2本を取り付ける。
4. ベースパイプは固定用ボタンを押しこみながら取り付け穴に根元まで差し込み。固定用ボタンが取り付け部分



5. 本体を表返し、背もたれを固定用ボタンを押しこみながらベースパイプに差し込む。
6. 固定用ボタンがベースパイプの固定用穴から突出するまで差し込む。



7. 手すりを手すり固定用パイプに差し込む。 固定用ボタンを押しこみながら差し込む。
8. 手すり固定用ボタンが固定用パイプから突出するまで差し込む。

